


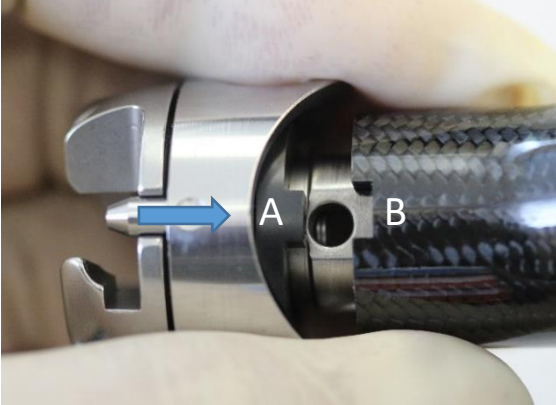


Demontage	
	
<p>Schritt 1: Fräswelle : 1: Handgriff 2: Gehäuse 3: Abdeckung 4: Hintere Welle 5: Kardanwelle</p>	<p>Schritt 2 Drücken der zwei Hebel und weg ziehen des Handgriffes</p>
	
<p>Schritt 3: Weg klappen der Abdeckung</p>	<p>Schritt 4: Raus ziehen der hintere Welle aus der Schnappverbindung (kräftig ziehen)</p>
	
<p>Schritt 5: Entfernen der Welle aus der Schnappverbindung mittels der hinteren Welle oder einem ähnlichen Werkzeug</p>	<p>Schritt 6: Raus schieben / ziehen der Kardanwelle aus dem Gehäuse</p>
	
<p>Fräswelle demontiert bereit für die Reinigung. Teilebezeichnung siehe Schritt 1.</p>	

Montage	
	
<p>Schritt 1 Reinschieben der Kardanwelle in das Gehäuse mit Kontrolle ob die Nase A in die Aussparung B passt (kritisch)</p>	<p>Schritt 2 Einklicken der Kardanwelle in die Führungen des Gehäuses. Man sollte zwei Klicks hören</p>
	
<p>Schritt 3 Montage von Abdeckung – hinterer Welle in umgekehrter Reihenfolge</p>	<p>Schritt 4 Darauf achten, dass vor Montage des Handgriffs die Form B des Ringes in die Nase A passt (kritisch).</p>
<p>Schritt 5 Montage Handgriff</p> <p>Der Handgriff kann in 45 Grad Schritten orientiert werden je nach Anwendung in der Operation</p>	

Betreffend Reinigung und Sterilisation dieses Instruments lesen Sie die mps PRECIMED Anleitung E1385

Diese Anleitung ist ein Zusatz zur mps PRECIMED Anleitung E1385.

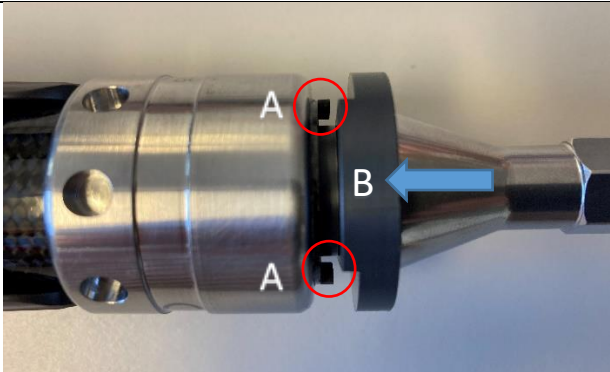In jedem Falle ist die mps PRECIMED Anleitung E1385 die bestimmende Anleitung und das regulativ, führende Dokument.