





MIS-Setzinstrument Pyramid Pfannenschale Demontage-, Reinigungs- und Montageanleitung

Für Demontage oben anfangen
Für Montage von unten anfangen

<p>Fig. 1</p> 	<p>Setzinstrument in benutzbarem, montiertem Zustand. Das Instrument wird in diesem Zustand sterilisiert</p>
<p>Fig. 2</p> 	<p>Demontage: Auseinanderziehen von Instrument und der Hülse</p> <p>Montage: Aufschieben der Hülse bis diese einrastet und das Gewinde sichtbar ist. Auf korrekte Rotationsposition der Hülse achten.</p>
<p>Fig. 3</p> 	<p>Demontage: Herausziehen der Kardanwelle zuerst seitlich (1), dann aus der oberen Führung (2).</p> <p>Montage: Kardanwelle in obere Führung (2) einführen, dann in untere Führung (1) einlegen.</p>
<p>Fig. 4</p> 	<p>Setzinstrument in demontiertem Zustand. Das Instrument wird in diesem Zustand gereinigt.</p>

Alle Instrumente sind mit Heissdampf zu sterilisieren. bei Reinigung und Sterilisation von wieder verwendbaren Instrumenten sind validierte, den gültigen Normen entsprechende Verfahren und Anlagen zu verwenden. Für weitere Informationen siehe Beipackzettel des zugehörigen Implantat-Produktes und Broschüre Atesos medical „Aufbereitung von wieder verwendbaren Instrumenten“.