

# Setzinstrument Schale MIS

## Demontage- und Montageanleitung

REF: 800097

Reihenfolge der Schritte für **Demontage**: 

Reihenfolge der Schritte für **Montage**: 



Abb. 1

Setzinstrument in benutzbarem, montiertem Zustand. Das Instrument wird in diesem Zustand sterilisiert

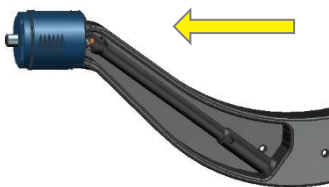


Abb. 2

**Demontage:**

Auseinanderziehen von Instrument und der Hülse

**Montage:**

Aufschieben der Hülse bis diese einrastet und das Gewinde sichtbar ist. Auf korrekte Rotationsposition der Hülse achten.

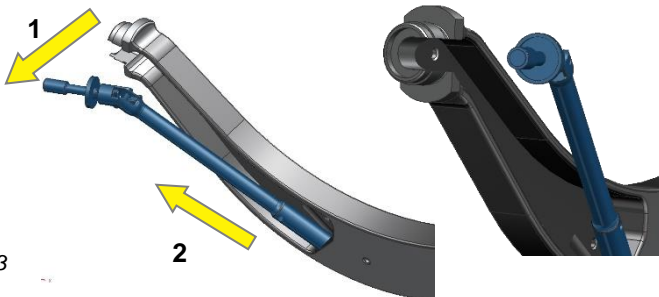


Abb. 3

**Demontage:** Herausziehen der Kardanwelle zuerst seitlich (1), dann aus der oberen Führung (2).

**Montage:** Kardanwelle in obere Führung (2) einführen, dann in untere Führung (1) einlegen.



Abb. 4

Setzinstrument in demontiertem Zustand.

Das Instrument wird in diesem Zustand gereinigt.

Alle Instrumente sind mit Heissdampf zu sterilisieren. Bei Reinigung und Sterilisation von wiederverwendbaren Instrumenten sind validierte, den gültigen Normen entsprechende Verfahren und Anlagen zu verwenden. Für weitere Informationen siehe Beipackzettel des zugehörigen Implantat-Produktes und Broschüre „Aufbereitung wiederverwendbarer Instrumente“ (Lit.Nr. 502.C006).

**Hinweis:** Obige Ausführungen sind ein Auszug aus der gültigen OP-Technik Pyramid Hüftpfanne (Lit.Nr.: 501.D001)